

light
l i g a



prestante per **passione**



DESCRIZIONI E DESTINAZIONE D'USO ADACTA LIGA LIGHT

L'ADACTA LIGA LIGHT è la base per sistemi di postura realizzata in lega di alluminio satinato per garantire leggerezza e durata nel tempo.

L'assenza di saldature rende la base più sicura. La base ADACTA LIGA LIGHT, data la sua modularità, si presenta con una molteplicità di configurazioni in grado di seguire l'evoluzione della patologia, della crescita somatica e dei conseguenti adattamenti posturali. Il dispositivo è destinato unicamente ad un utilizzo personale con la presenza di un accompagnatore sia in ambienti interni che esterni.


La base ADACTA LIGA LIGHT può essere conformata in base alle necessità dell'utilizzatore finale agendo su:

- Traslazione della sovrastruttura (che accoglie il sistema di postura) rispetto al sottotelaio;
- Traslazione delle ruote posteriori garantendo le condizioni di sicurezza (come previsto dal manuale);
- Regolazione profondità seduta;
- Regolazione assetto alto/basso.

BASI PER POSTURA ADACTA LIGA LIGHT

REGOLAZIONI TELAIO:

- Profondità seduta
- Assetto 43 cm/49 cm (con ruote da 300 mm e 500 mm)
- Traslazione continua piastra ruote posteriori
- Traslazione continua sovrastruttura

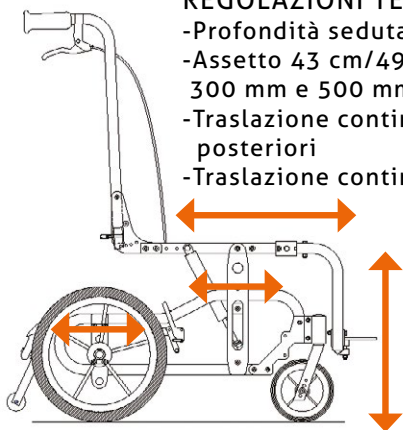

"UNA SCELTA DI MODULARITÀ, VERSATILITÀ E LEGGEREZZA"

Angolo Ginocchio

ADULTO:
Ribaltabile ed estraibile

PEDIATRICO:
Estraibile



CRASH TEST



Per trasporto in auto si consiglia l'uso del poggiatesta



La più **STABILE** e **RESISTENTE** delle basi per sistemi di postura

DIMENSIONE TELAIO

Misura Telaio (larghezza esterno tubi x profondità cm)

	MISURA	LARGHEZZA SEDUTA	PROFONDITÀ REGOLATA A: <small>(in grassetto configurazione standard)</small>
PEDIATRICHE	US	30	• 36 • 38,5 • 41 • 44
	XXS	35	• 36 • 38,5 • 41 • 44
	XS	35	• 40 • 42,5 • 45 • 48
	XSO	38	• 40 • 42,5 • 45 • 48
ADULTO	XS1	38	• 44 • 46,5 • 49 • 52
	S	41	• 44 • 46,5 • 49 • 52
	M	41	• 48 • 50,5 • 53 • 56
	M1	44	• 48 • 50,5 • 53 • 56
	L	47	• 44 • 46,5 • 49 • 52
	XL	47	• 48 • 50,5 • 53 • 56

PARTI FONDAMENTALI

- Struttura portante Adacta Liga Light rigida o chiudibile
- Basculamento continuo:
 - Pediatrico da 2° a 35° (da 6° a 39°) ①
 - Adulto da 4° a 30° (da 8° a 34°) ①
- ① Il basculamento può essere maggiorato di 4° con aumento dell'inclinazione iniziale del telaio agendo sui fori di posizionamento delle ruote anteriori nella forcella.
- Azionamento basculamento a leva
- Reclinazione a piastra con perno predeterminata:
3°, 9°, 15°, 22°
- Freno stazionamento a leva
- Montanti schienale fissi abbattibili
- Regolazione profondità seduta
- Piastra regolazione assetto:
 - Alto (49 cm da terra) - Basso (43 cm da terra)
- Traslazione continua della sovrastruttura rispetto al telaio
- Traslazione continua delle piastre ruote posteriori
- Rutine antiribaltamento fisse
- Pedane separate
- Fascia poggia polpacci semplice
- Angolo ginocchio:
 - Misura adulto ribaltabile ed estraibile: 75°
 - Misura pediatrica estraibile: 90°

PARTI OPZIONABILI

(CON O SENZA SOVRAPREZZO PREGASI CONSULTARE IL MODULO D'ORDINE)

- Ruote anteriori:
 - 150 mm o 6" piene
 - 175 mm o 7" piene
- Ruote posteriori:
 - 300 mm o 12" (piene o pneumatiche, piene o pneumatiche con freno a tamburo, piene o pneumatiche con freno a tamburo + leva)
 - 400 mm o 16" (piene o piene con freno a tamburo con assetto a 45cm)
 - 500 mm o 20" (piene o pneumatiche senza corrimano, pneumatiche con corrimano con freno a tamburo, pneumatiche con corrimano con freno a tamburo + leva)
 - 600 mm o 24" (pneumatiche con corrimano, non opzionabili su mis. US e se opzionale comportano una riduzione del basculamento a 20° con assetto a 47cm)
 - corrimano per ruote da 500 mm
- Angolo ginocchio:
 - Misura adulto ribaltabile ed estraibile:
90°, Elevabile, Verticale (elevabile e telescopico)
 - Misura pediatrica estraibile: 75°, elevabile
- Poggiapiedi
 - Unico
 - Asolato solo separati
- Azionamento basculamento a pedale in alternativa a quello standard a leva che è fortemente consigliato.
- Montanti schienale:
 - Kit manici di spinta regolabili in altezza con perno
 - Kit manici di spinta telescopici con bloccetto a leva
 - Kit maniglione unico regolabile in inclinazione per guida
 - Kit maniglione separato regolabile in inclinazione per chiudibile (solo mis. pediatriche)
 - Kit maniglione unico regolabile in inclinazione e telescopico
 - Quick-release per la regolazione facilitata della reclinazione schienale
- Rutine antiribaltamento estraibili



ACCESSORI

La dotazione di accessori permette di configurare il sistema in funzione delle esigenze dell'utilizzatore

- Base sedile in legno
- Kit braccioli tubolari ribaltabili/inclinabili regolabili in altezza
- Kit spondina regolabile in altezza con appoggio
- Kit spondina regolabile in altezza e profondità, estraibile con appoggio multi-regolabile
- Kit solo hardware regolabile in altezza e profondità, estraibile
- Contenitori al bacino linea Versa
- Unità posturali arti superiori linea Versa
- Poggiapolpacci (unico, separato)
- Poggiapolpacci imbottito a cassetta (unico, separato)
- Fascia poggia polpacci imbottita
- Cinghia pelvica linea Versa Fixatis
- Tavolino in legno
- Kit trasporto auto (solo assetto 43 cm e con ruote posteriori tutte tranne le 600 mm)
- Pedalino per barriere architettoniche

ASSETTO

Altezza:

- Regolabile in altezza a 43 cm o 49 cm (ruote 400 mm solo assetto a 45 cm, ruote 600 mm solo assetto a 47 cm)

COLORI

ADACTA LIGA LIGHT è disponibile in 5 differenti colori

BLU	ROSSO	TITANIO	TURCHESE	ROSA
				

Per l'elenco completo e dettagliato delle parti opzionabili e/o accessori, fare riferimento all'ultima scheda d'ordine in vigore.


Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF (con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.promedicare.eu



MANICI REGOLABILI IN ALTEZZA ED ORBITALI




REGOLAZIONE MECCANICA MONTANTE SCHIENALE PREDETERMINATA

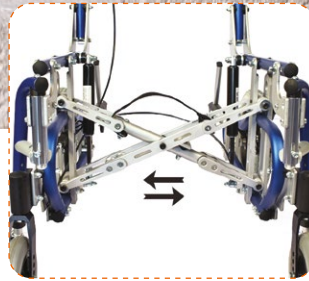

SISTEMA DI CROCIERA STABILIZZANTE




RUOTINE ANTI-RIBALTAMENTO

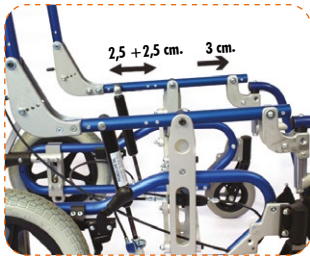


REGOLAZIONE PROFONDITÀ



BASE SOLIDA IN LEGNO

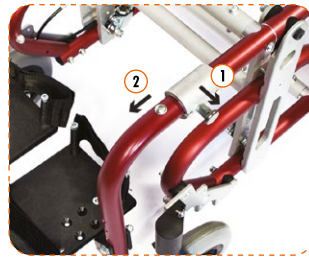

ANGOLO GINOCCHIO ESTRAIBILE (MISURE PEDIATRICHE)

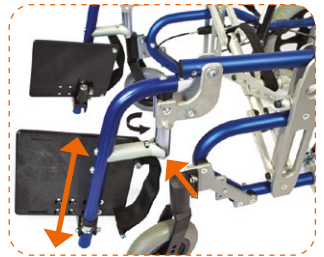

ANGOLO GINOCCHIO RIBALTABILE ED ESTRAIBILE (MISURE ADULTO) CON POGGIAPIEDI TELESCOPICO

DIMENSIONI CARATTERISTICHE TELAIO

Larghezza (cm)		US	XXS	XS	XSO	XS1	S	M	M1	L	XL
ruota 300 mm	standard	48	53	53	56	56	59	59	62	65	65
	c/freno a tamburo	49	54	54	57	57	60	60	63	66	66
ruota 400/500 mm	standard	50	55	55	58	58	61	61	64	67	67
	c/freno a tamburo	53	58	58	61	61	64	64	67	70	70
ruota 600 mm		/	55	55	58	58	61	61	64	67	67
Raggio di inversione (cm)		69	69	72	75	75	75	78	78	75	78
Q*(min-max) altezza da tubo sedile a pedana (cm)		13-23	13-23	13-26	13-26	28-36	28-36	32-40	32-40	28-36	32-40
H** altezza tubo sedile da terra (cm)		43 e 49 con ruote posteriori di 300/500 47 con ruota posteriore da 600mm									
Pendenza massima		7°									

Portata (kg)/ Peso telaio (kg)	Portata (kg)		Peso (kg)	
	R	C	R	C
US	50	50	14,1	14,9
XXS	50	50	14,4	15,3
XS	50	50	14,7	15,6
XSO	50	50	15,4	15,9
XS1	75	75	19,2	19,5
S	75	75	19,5	19,9
M	100	75	19,8	20,2
M1	100	75	19,9	20,3
L	100	75	20,1	20,5
XL	100	75	20,3	20,8

N.B. * il valore Q, riferito con tubo poggiagamba a 90°, può essere aumentato di 5-7 cm con utilizzo di tubo a 75°

**il valore H è misurato da esterno tubo sedile in corrispondenza della piastra di basculamento; il telaio verrà consegnato con H=43 cm

Peso telaio con ruote, angolo ginocchio e pedana come da configurazione standard



DIMENSIONI CARATTERISTICHE TELAIO

Il dispositivo per essere disassemblato, non necessita di utensili e può essere trasportato in aereo o in auto. Il dispositivo può essere utilizzato come sedile in autoveicolo, opportunamente allestito con sistemi di ancoraggio per trasporto di persone diversamente abili, se dotato di apposito kit per trasporto auto.

Dimensione di ingombro (cm) del telaio con montanti (fissi) abbassati, poggiategambe e ruote posteriori disinseriti

Misura		US	XXS	XS	XS0	XS1	S	M	M1	L	XL
Lunghezza		66	66	68	68	71	73	83	83	73	83
Larghezza	R	42	48	48	51	51	54	54	57	54	60
	C	30	30	30	30	30	32	32	32	32	32
Altezza		65	65	66	66	67	67	68	68	67	68
Peso (Kg)	R	11,4	11,7	12	12,7	12,9	13,1	13,5	13,6	13,8	14
	C	12,2	12,6	12,9	13,2	13,3	13,6	13,9	14	14,2	14,5

N.B. Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle piastre. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard

Misura			US	XXS	XS	XS0	XS1	S	M	M1	L	XL
Ruota 300 mm	Senza angolo ginocchio	L	70	70	73	73	75	75	78	78	75	78
	Angolo posizionato a 75°	Lmin/Lmax	92/99	92/99	93/100	93/100	97/104	97/104	100/107	100/107	97/104	100/107
	Angolo posizionato a 90°	Lmin/Lmax	88/96	88/96	91/99	91/99	93/100	93/100	96/103	96/103	93/100	96/103
Ruota 400 mm	Senza angolo ginocchio	L	74	74	77	77	79	79	82	82	79	82
	Angolo posizionato a 75°	Lmin/Lmax	95/101	95/101	96/103	96/103	100/107	100/107	103/110	103/110	100/107	103/110
	Angolo posizionato a 90°	Lmin/Lmax	93/99	93/99	94/100	94/100	96/102	96/102	99/104	99/104	96/102	99/104
Ruota 500 mm	Senza angolo ginocchio	L	78	78	81	81	84	84	87	87	84	87
	Angolo posizionato a 75°	Lmin/Lmax	98/103	98/103	99/107	99/107	103/113	103/113	106/116	106/116	103/113	106/116
	Angolo posizionato a 90°	Lmin/Lmax	95/101	95/101	97/102	97/102	100/106	100/106	103/109	103/109	100/106	103/109
Ruota 600 mm	Senza angolo ginocchio	L	/	83	84	84	85	85	88	88	85	88
	Angolo posizionato a 75°	Lmin/Lmax	/	101/109	103/112	103/112	108/116	108/116	111/120	111/120	108/116	111/120
	Angolo posizionato a 90°	Lmin/Lmax	/	98/104	101/107	101/107	105/112	105/112	108/116	108/116	105/112	108/116

L = Lunghezza del telaio senza angolo ginocchio

Lmin = Lunghezza del telaio con angolo ginocchio e pedana posizionata tutta indietro

Lmax = Lunghezza del telaio con angolo ginocchio e pedana posizionata tutta in avanti

N.B. Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle piastre. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard

**N.B.: tutti i dispositivi standard sono stati inseriti nel repertorio dei dispositivi medici in accordo con la normativa vigente del Ministero della Salute (D.M. 20 Febbraio 2007 e 21 Dicembre 2009)
PER IL NUMERO DI REPERTORIO CONSULTARE LA SCHEDA D'ORDINE PRESENTE SUL NOSTRO SITO WEB**



base per sistemi di postura

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA:

 **Promedicare**

Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY
Tel. +(39) 0831 777840
Email: info@promedicare.it
www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ ISO 9001/ISO 13485

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 13485



Il produttore si riserva di apportare modifiche o sostituzione senza preavviso. I contenuti, la forma, la creazione, l'ingegno, l'immagine, la strutturazione di questo catalogo, sono di proprietà della Pro-Medicare srl. Ogni utilizzo improprio e non autorizzato è vietato. Ogni imitazione e/o copia esplicita e non, potranno essere perseguite.