


T Thinking

MEDIANO  
**inserto**<sup>®</sup>  
SEAT

SEAT

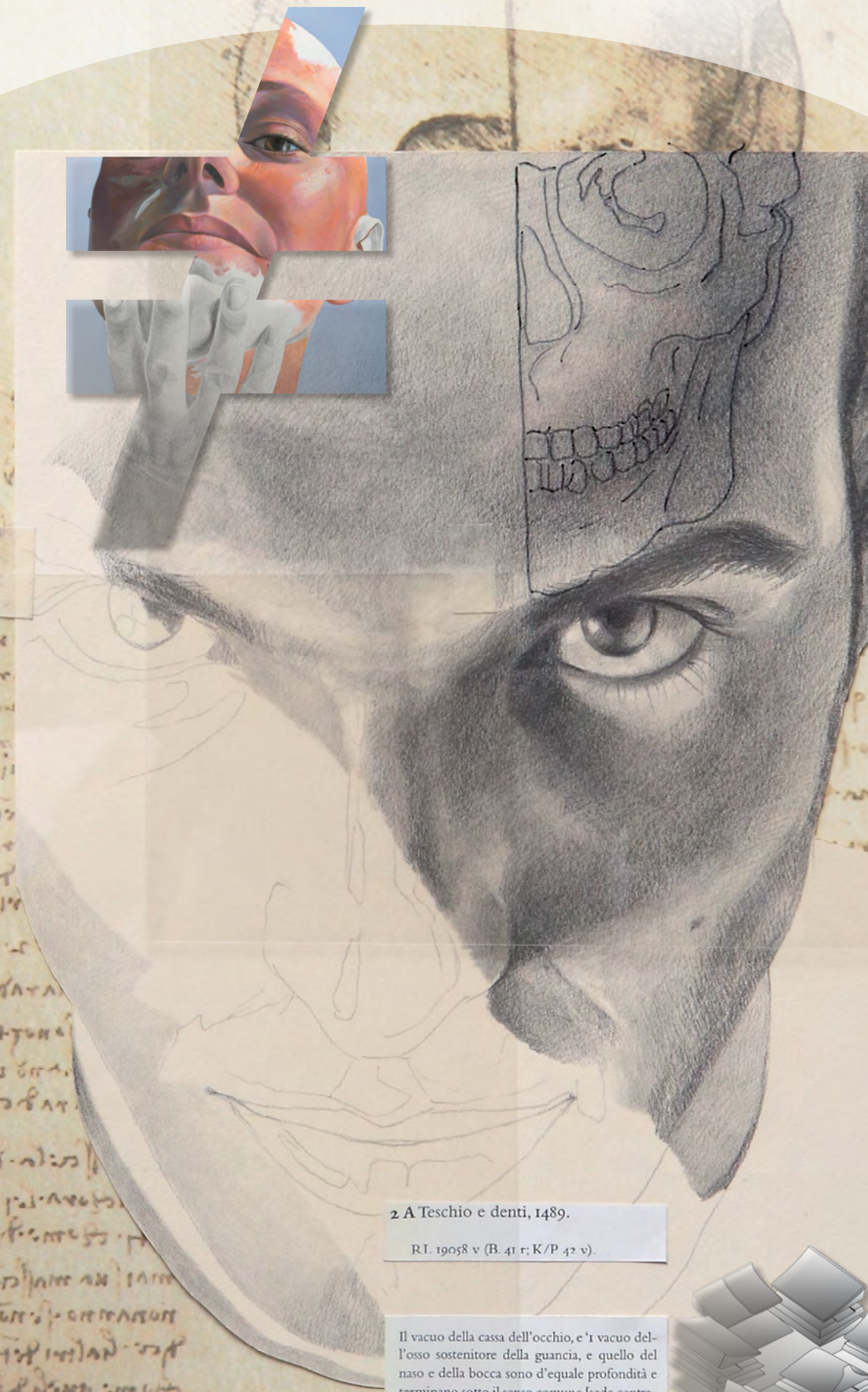

2 A Teschio e denti, 1489.

R.I. 19058 v (B. 41 r; K/P 42 v).

Il vacuo della cassa dell'occhio, e 'i vacuo dell'osso sostenitore della guancia, e quello del naso e della bocca sono d'eguale profondità e terminano sotto il senso comune [sede centrale delle sensazioni] per linea perpendicolare. E ciascuna d'esse vacuità ha tanto di profondità quant'è la terza parte del volto dell'omo, cioè dal mento a capegli.



UNA NUOVA SOLUZIONE  
PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE

# UNA NUOVA SOLUZIONE PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE

## Kit di costruzione della seduta individuale Perfetta ricostruzione delle forme anatomiche



### Perchè Mediano ?

- CONFORMAZIONE ANATOMICA
- AMPIO SUPPORTO
- SOSPENSIONE E SCARICO ISCHIO/TROCANTERICO/COCCIGEO



KIT STRUTTURALE  
MODULARE E MODIFICABILE



KIT DI IMBOTTITURA  
*Forme Libere*



ADATTABILITÀ  
INFINITA

### INDICAZIONI CLINICHE / DESTINAZIONE D'USO

L'unità posturale bacino Inserto Seat Mediano è consigliata preferibilmente ma non esaustivamente per utenti non deambulanti, con una media/alta necessità di allineamento/compensazione posturale in particolare:

- Che necessitano di un medio supporto e contenimento laterale, anteriore e posteriore del bacino, ed è a medio rischio di piaghe da decubito;
- Che presentano asimmetrie, colpi di vento, obliquità pelviche, rotazioni pelviche, retroversioni ed anteroversioni pelviche di moderata e grave entità.

L'unità posturale deve essere utilizzata con una qualsiasi base di sostegno /carrozzina opportunamente fissata attraverso idonei sistemi aggiranti.

**PTS** Pelvic Total Support

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Ogni unità posturale Inserto Mediano include:

- Kit strutturale composto da una base piatta di costruzione e 16 o 17 inserti in polietilene a celle chiuse, personalizzabili e modificabili, utili a sostenere o correggere nel tempo la postura del bacino individualmente;
- kit di imbottitura a forme libere, lavabile con detergente neutro, composto:
  - nella zona posteriore da 2 pad sovrapposte, una superiore in foam viscoelastico a ritorno lento di memoria per favorire il massimo comfort ed adattamento alle sagomature del corpo e dell'unità posturale ed una inferiore in memory foam per la più elevata protezione al rischio di piaghe da decubito;
  - nella zona anteriore da 2 pad (lato destro e lato sinistro) in foam viscoelastico a ritorno lento di memoria per favorire un naturale alloggiamento delle gambe.
- Fodera di rivestimento New 3D areata, incontinente, ignifuga, antibatterica, lavabile in acqua tiepida con detergente neutro. Si sconsiglia di utilizzare macchine per l'asciugatura. Il materiale non prevede l'impiego di sostanze disinfettanti.

#### RICAMBI

- Base piatta di costruzione
- Fodera di rivestimento
- Kit di imbottitura

### AVVERTENZE

L'Unità posturale **Inserto Seat Mediano**, nella sua integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione (kit strutturale, Kit imbottitura, Rivestimento) può essere semplicemente adattata alle misure/morfologia/deformità dell'utilizzatore. Questo tipo di operazioni rendono la messa in servizio riferibile a quella di un dispositivo di fabbricazione di serie.

In alternativa

La messa in servizio della Unità Posturale **Inserto Seat Mediano**, priva o modificata anche parzialmente della integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione approntata e costruita secondo la prescrizione scritta da parte dell'operatore professionale in funzione dell'anatomia/morfologia/deformità dell'utilizzatore attraverso rilievo delle sue misure e prove dirette, è riferibile a quella di un dispositivo fabbricato su misura.

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF (con possibilità di ingrandire il testo) sul sito [www.versainser.to.com](http://www.versainser.to.com)





## Inserto Mediano

16/17\* INSERTI MODULARI MODIFICABILI


FODERA "NEW 3D" ELASTICA, INCONTINENTE, AREATA.

° Ogni kit posturale è da ordinare in base alla misura della carrozzina/dispositivo di trasporto.

TABELLA MISURE INSERTO MEDIANO	PEDIATRICO						ADULTO						MISURE (cm.)	
	UUS	USS	US	XXS	XS	XS1S	XS1	S	M	M1S	M1	L	XL	
Larghezza Effettiva (cm)	25	30	30	36	36	40	40	42	42	45	45	48	48	
Larghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	27	32	32	38	38	42	42	44	44	47	47	50	50	
Largh. Min ottenibile con asportazione materiale (cm)	23	28	28	34	34	38	38	40	40	43	43	46	46	
Lunghezza Effettiva (cm)	30	30	38	38	42	40	45	45	50	45	50	45	50	
Lunghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	32,5	32,5	40,5	40,5	44,5	42,5	47,5	47,5	52,5	47,5	52,5	47,5	52,5	
Lunghezza Min ottenibile con regolazione tagli posteriori e rimozione inserti (cm)*	24	24	32	32	36	34	39	39	44	39	44	39	44	
Range Min e Max altezza anteriore base piatta costruz+inserto 10 (cm)**	4/5,5		** altezze riferite ai modelli UUS e XL											
Range Min e Max altezza posteriore base piatta costruz+inserti contenit bacino 6 (cm)**	8,5/11,5		** altezze riferite ai modelli UUS e XL											
Peso unità posturale min/max: 1,3 kg/2,5 kg														

\* possibili ulteriori riduzioni a mezzo asportazione materiale

° Portata Max. riferita al modello XL (48cmx50cm) : 135 kg

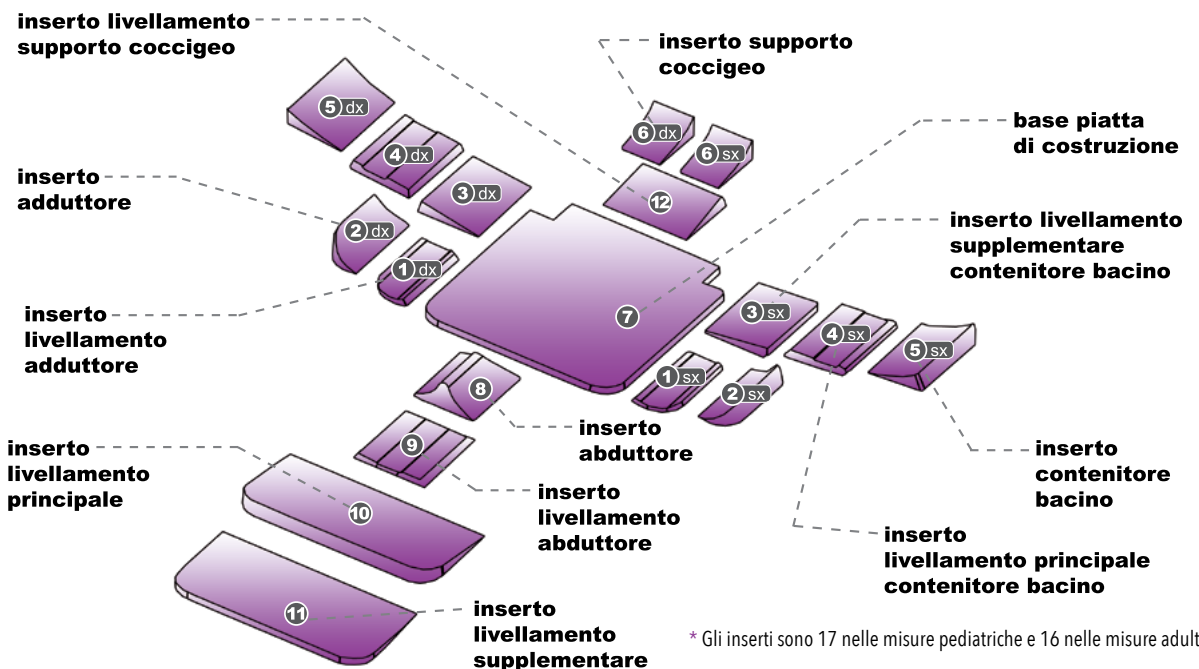

\* Gli inserti sono 17 nelle misure pediatriche e 16 nelle misure adulte


## Personalizzazioni Mediano



PERSONALIZZAZIONE ALTEZZA  
ABDUTTORE




PERSONALIZZAZIONE ALTEZZA  
ADDUTTORI

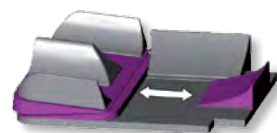

GESTIONE RETROVERSIONE  
BACINO E ANTIVERSIONE



REGOLAZIONE APPOGGI  
TROCANTERICI PER IPERCARICO ISCHII

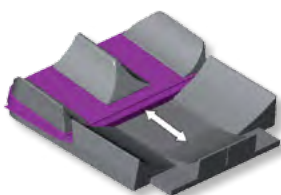

GESTIONE  
ANTISCIVOLAMENTO BACINO



GESTIONE ADDUZIONE  
FISSA



GESTIONE ABDUZIONE  
FISSA



GESTIONE RIGIDITÀ  
D'ANCA



GESTIONE OBLIQUITÀ  
PELVICA



GESTIONE ROTAZIONE  
BACINO

PERSONALIZZABILE  
INDIVIDUALMENTE

Kit di costruzione  
della seduta individuale



## LA SOLUZIONE INNOVATIVA

Una gamma sviluppata per rispondere alle esigenze posturali individuali dell'utente (come da prescrizione) in esiti di molteplici patologie per l'intero ciclo di vita di utilizzo. Al fine del mantenimento delle sue caratteristiche è necessario controllare periodicamente lo stato di conservazione ed usura di tutte le parti che compongono il dispositivo ivi inclusi i sistemi aggrappanti. L'unità posturale viste le dimensioni ed il peso risulta facilmente trasportabile.

### 1 ADATTABILITÀ UOMO/DONNA

Finalmente la soluzione che fa la differenza, vestibilità personalizzata.

### 2 ADATTABILITÀ ALL'ANATOMIA E MORFOLOGIA INDIVIDUALE

Infinite possibilità per realizzare la soluzione posturale customizzata.

### 3 PTS PELVIC TOTAL SUPPORT

Perfetta aderenza all'anatomia del bacino e dei segmenti corporei ad esso correlati. Induce la risposta attiva del sistema muscolo scheletrico. La distribuzione dei carichi fornita dal PTS riduce lo stress meccanico nei tessuti profondi ed introduce benefici nella prevenzione delle ulcere da ipercarico pressorio.

### 4 IMBOTTITURA FORME LIBERE

L'innovativa imbottitura modulare per immergersi nel massimo comfort con protezione sicura.







PRODOTTO DA:



Via Montagna Z.I. - Lotto 41  
72023 Mesagne (BR) - ITALY  
Tel. +(39) 0831 777840  
Email: info@promedicare.it  
www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI  
GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485

CERTIFIED  
ISO 9001  
ISO 13485

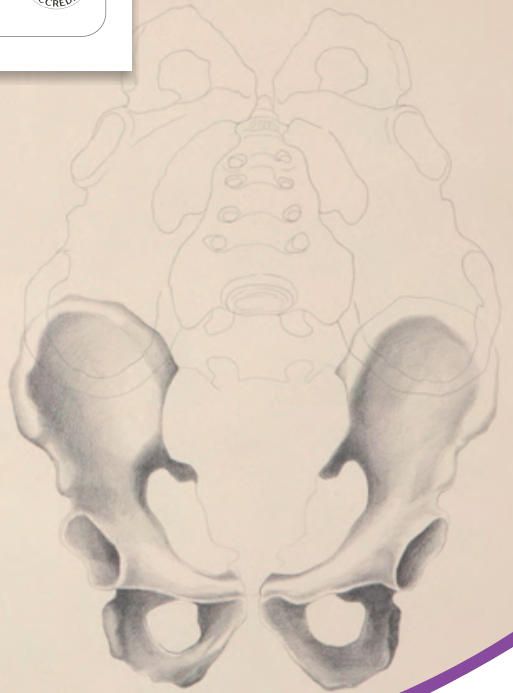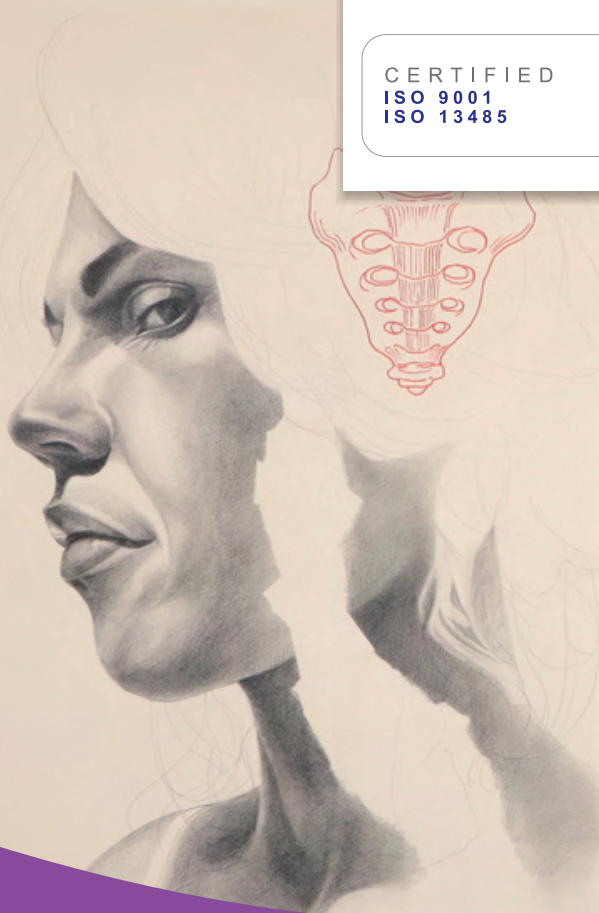

DISTRIBUITO DA:



CE GARANZIA 2 ANNI

www.versainserto.com