

T Thinking

PRATICO
inserto[®]
SEAT


SEAT



2 A Teschio e denti, 1489.

R.I. 19058 v (B. 41 r; K/P 42 v).

Il vacuo della cassa dell'occhio, e 'i vacuo dell'osso sostenitore della guancia, e quello del naso e della bocca sono d'eguale profondità e terminano sotto il senso comune [sede centrale delle sensazioni] per linea perpendicolare. E ciascuna d'esse vacuità ha tanto di profondità quant'è la terza parte del volto dell'omo, cioè dal mento a capegli.

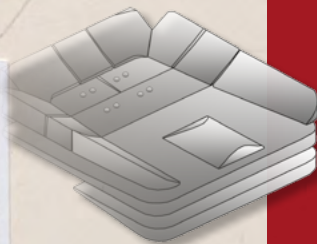

UNA NUOVA SOLUZIONE
PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE

UNA NUOVA SOLUZIONE PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE

Kit di costruzione della seduta individuale Perfetta ricostruzione delle forme anatomiche



Perchè Pratico ?

- FACILITA L'AUTOSPINTA
- LEGGERO
- PRATICO E SOTTILE



**KIT STRUTTURALE
MODULARE E MODIFICABILE
A DENSITÀ DIFFERENZIATA**



**KIT DI IMBOTTITURA
*Forme Libere***



**STABILIZZANTE
E MANEGGEVOLE**

INDICAZIONI CLINICHE / DESTINAZIONE D'USO

L'unità posturale bacino Inserto Seat Pratico è consigliata preferibilmente ma non esaustivamente per utenti non deambulanti con moderate deformità e con una discreta necessità di contenimento e stabilizzazione posturale in particolare:

- Che necessitano di un moderato supporto posturale;
- Che conducono una vita attiva e necessitano di un cuscino maneggevole ed agevole nei trasferimenti;
- Che necessitano di un buon supporto e contenimento laterale delle gambe, con lieve riduzione rischio di piaghe da decubito e/o che utilizzano ortesi per il controllo delle deformità;
- Che presentano asimmetrie, colpi di vento obliquità pelviche, rotazioni pelviche, retroversioni ed anteroversioni pelviche di entità lieve;
- Che necessitano di controllo laterale delle gambe per migliorare l'autocontrollo del tronco.

L'unità posturale deve essere utilizzata con una qualsiasi base di sostegno/carrozzina opportunamente fissata attraverso idonei sistemi aggiranti.

PTS Pelvic Total Support

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ogni unità posturale Inserto Pratico include:

- Kit strutturale a densità differenziata composto da una base piatta di costruzione e da una serie di 9 inserti in polietilene a celle chiuse, personalizzabili e modificabili, utili a sostenere o correggere nel tempo la postura del bacino individualmente.
- kit di imbottitura *Forme Libere*, lavabile con detergente neutro, composto da uno strato superiore di memory foam ed uno strato inferiore nella sola zona posteriore di schiuma poliuretanicca espansa flessibile.
- Fodera di rivestimento New 3D areata, incontinent, ignifuga, antibatterica; lavabile in acqua tiepida con detergente neutro. Si sconsiglia di utilizzare macchine per l'asciugatura. Il materiale non prevede l'impiego di sostanze disinfettanti.

RICAMBI

- Base piatta di costruzione
- Fodera di rivestimento
- Kit di imbottitura

AVVERTENZE


L'Unità posturale Inserto Seat Pratico, nella sua integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione (kit strutturale, Kit imbottitura, Rivestimento) può essere semplicemente adattata alle misure/morfologia/deformità dell'utilizzatore. Questo tipo di operazioni rendono la messa in servizio riferibile a quella di un dispositivo di fabbricazione di serie.

In alternativa

La messa in servizio della Unità Posturale Inserto Seat Pratico, priva o modificata anche parzialmente della integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione approntata e costruita secondo la prescrizione scritta da parte dell'operatore professionale in funzione dell'anatomia/morfologia/deformità dell'utilizzatore attraverso rilievo delle sue misure e prove dirette, è riferibile a quella di un dispositivo fabbricato su misura.

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF (con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.versainserito.com



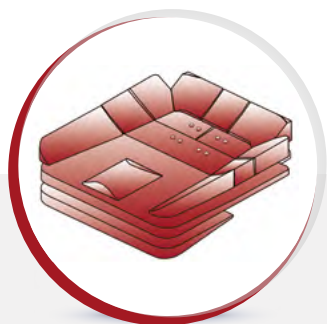

Inserto Pratico

12/13 INSERTI MODULARI MODIFICABILI


FODERA "NEW 3D" ELASTICA, INCONTINENTE, AREATA.

° Ogni kit posturale è da ordinare in base alla misura della carrozzina/dispositivo di trasporto.

TABELLA MISURE INSERTO PRATICO	PEDIATRICO						ADULTO						MISURE (cm.)			
	2025	2525	2530	3030	3038	3638	3642	4040	4045	4245	4250	4545	4550	4845	4850	
Larghezza Effettiva (cm)	20	25	25	30	30	36	36	40	40	42	42	45	45	48	48	
Larghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	22	27	27	32	32	38	38	42	42	44	44	47	47	50	50	
Largh. Min ottenibile con asportazione materiale (cm)	18	23	23	28	28	34	34	38	38	40	40	43	43	46	46	
Lunghezza Effettiva (cm)	25	25	30	30	38	38	42	40	45	45	50	45	50	45	50	
Lunghezza Min ottenibile con regolazione tagli posteriori e rimozione o lavorazione inserti (cm)*	19	19	24	24	32	32	36	34	39	39	44	39	44	39	44	
Range Min e Max altezza anteriore base piatta costruzione 5 (cm)**	2,5/3		** altezze riferite ai modelli 2025 e 4850													
Range Min e Max altezza posteriore base piatta costruzione+inserti contenitori post 3,4 (cm)**	5,5/ 7,5		** altezze riferite ai modelli 2025 e 4850													
Peso unità posturale min/max: 0,6 kg/2,2 kg																

* possibili ulteriori riduzioni a mezzo asportazione materiale

° Portata Max. riferita al modello 4850: 135 kg

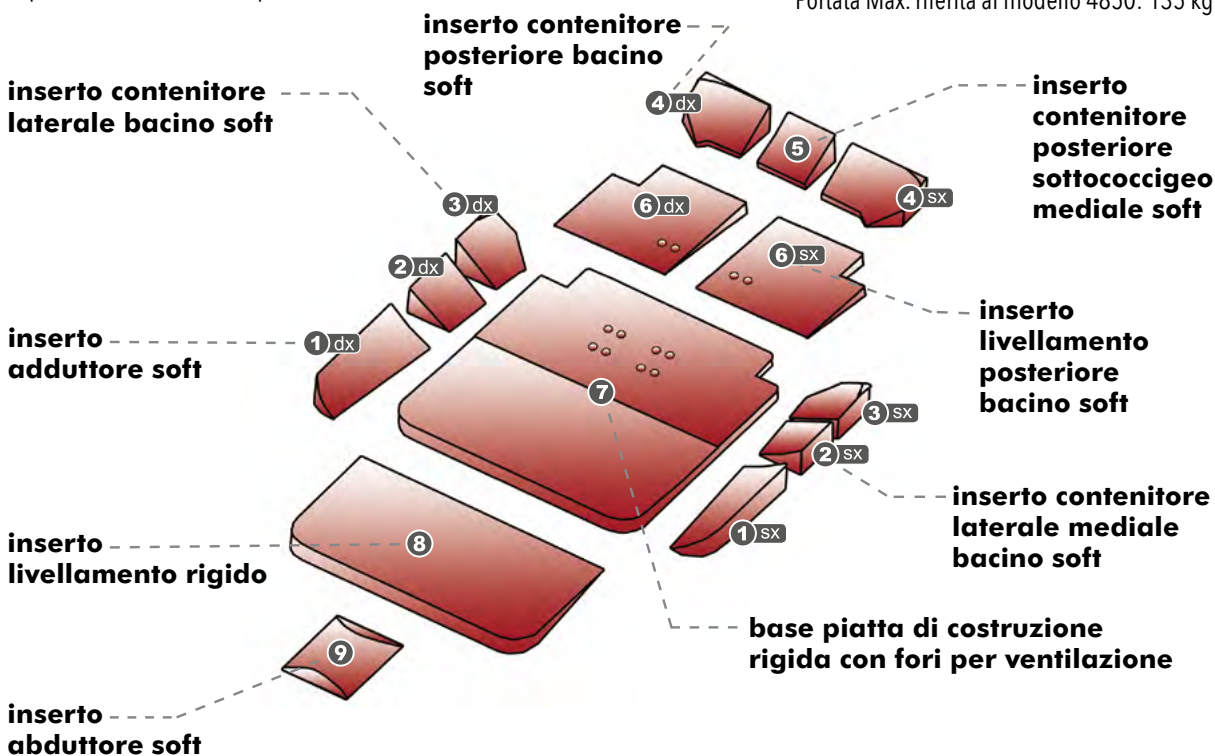


Personalizzazioni Pratico



APPOGGIO POSTERIORE
INDIPENDENTE ISCHIO-COCCIGEO




REGOLAZIONE APPOGGI
TROCANTERICI PER IPERCARICO ISCHII

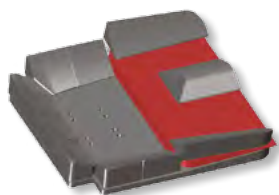

ANTISCIVOLAMENTO BACINO



ADDUZIONE PER FACILITARE
L'AUTOSPINTA

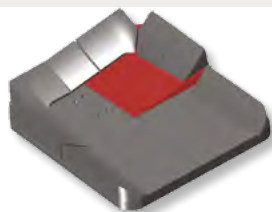

OBLIQUITÀ PELVICA



RETROVERSIONE BACINO E
ANTIVERSIONE



CHIUSURA ANGOLO TRONCO-BACINO

PERSONALIZZABILE
INDIVIDUALMENTE

Kit di costruzione
della seduta individuale



LA SOLUZIONE INNOVATIVA

Una gamma sviluppata per rispondere alle esigenze posturali individuali dell'utente (come da prescrizione) in esiti di molteplici patologie per l'intero ciclo di vita di utilizzo. Al fine del mantenimento delle sue caratteristiche è necessario controllare periodicamente lo stato di conservazione ed usura di tutte le parti che compongono il dispositivo ivi inclusi i sistemi aggrappanti.

www.versainserito.com

1 ADATTABILITÀ UOMO/DONNA

Finalmente la soluzione che fa la differenza, vestibilità personalizzata.

2 ADATTABILITÀ ALL'ANATOMIA E MORFOLOGIA INDIVIDUALE

Infinite possibilità per realizzare la soluzione posturale customizzata.

3 PTS PELVIC TOTAL SUPPORT

Perfetta aderenza all'anatomia del bacino e dei segmenti corporei ad esso correlati. Induce la risposta attiva del sistema muscolo scheletrico. La distribuzione dei carichi fornita dal PTS riduce lo stress meccanico nei tessuti profondi ed introduce benefici nella prevenzione delle ulcere da ipercarico pressorio.

4 IMBOTTITURA FORME LIBERE

L'innovativa imbottitura modulare per immergersi nel massimo comfort con protezione sicura.






PRODOTTO DA:



Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY
Tel. +(39) 0831 777840
Email: info@promedicare.it
www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 13485

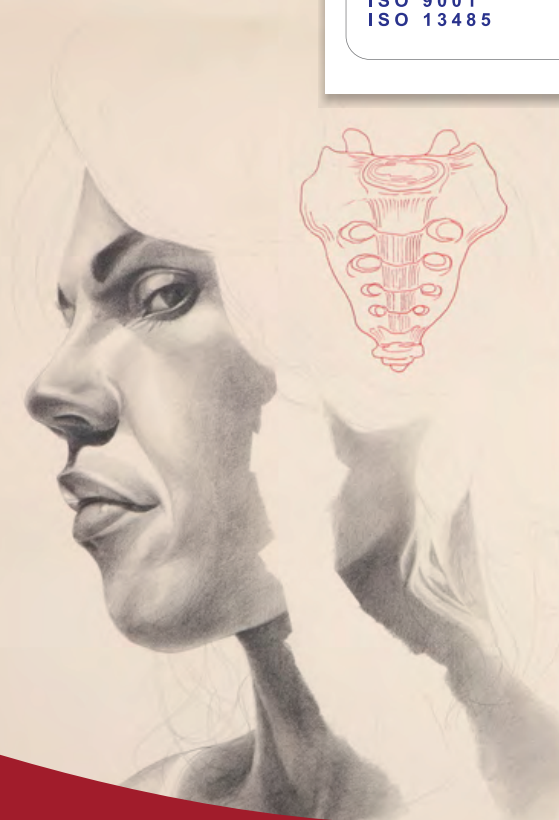

DISTRIBUITO DA:



CE GARANZIA 2 ANNI

www.versainserito.com