

## INSERTO SEAT NAUCO

La presente scheda tecnica è parte integrante del Manuale di istruzione d'uso della Linea Inserto Seat.

Prima dell'utilizzo è indispensabile che l'utilizzatore professionale spieghi le procedure per una corretta messa in servizio e per un'adeguata manutenzione ordinaria.

### 1. Messa in servizio

L'unità posturale bacino **Inserto Nauco** della linea Inserto Seat si presenta come segue:

- 1) Kit strutturale a densità differenziata composto da una base piatta di costruzione e da 22/24 inserti in polietilene a celle chiuse personalizzabili e modificabili, utili a sostenere o correggere nel tempo la postura del bacino individualmente
- 2) Kit di imbottiture a due strati lavabile con detergente neutro: lo strato interno al rivestimento è in memory foam, per una più elevata protezione dal rischio di piaghe da decubito, mentre lo strato esterno è in schiuma poliuretanicca espansa flessibile ed elastica
- 3) Fodera di rivestimento con uno strato interno che la rende incontinente; la stessa è ignifuga e antibatterica.



### 2. Utilizzo

L'unità posturale bacino **Inserto Nauco** è consigliata preferibilmente, ma non esaustivamente per utenti non deambulanti, con insufficiente controllo posturale, in particolare:

- che presentano asimmetrie, colpi di vento, obliquità pelviche, rotazioni pelviche, retroversioni e anteroversioni pelviche o che sono a rischio di lussazioni dell'anca
- che necessitano di controllo laterale delle gambe e sostegno sacro/lombare per migliorare l'autocontrollo del tronco
- per utenti anche piccolissimi che devono essere condotti ad una posizione seduta
- per utenti che utilizzano ortesi per il rachide
- per utenti che presentano una protrusione al livello sacrale/lombare.

L'unità posturale bacino **Inserto Nauco** può essere combinata, mediante nastro adesivo aggrappante ad uncini, con una qualsiasi base di sostegno e/o carrozzina, purché la struttura che accoglierà l'unità posturale stessa sia sufficientemente solida per reggere in sicurezza l'utente durante l'utilizzo.



*Una volta completate le modifiche (eventuali asportazioni/rimozioni di cunei), per l'approntamento e la configurazione della seduta personalizzata ed individuale, come da prescrizione, per la perfetta ricostruzione delle forme anatomiche dell'utente, la stessa seduta non potrà essere utilizzata per altri utenti.*

L'unità posturale **Inserto Seat Nauco**, nella sua integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione (Kit strutturale, Kit imbottitura, Rivestimento) può essere semplicemente adattata alle misure/morfologia/deformità dell'utilizzatore. Questo tipo di operazioni rendono la messa in servizio **referibile a quella di un dispositivo di fabbricazione di serie**.

In alternativa, la messa in servizio dell'unità posturale **Inserto Seat Nauco**, priva o modificata anche parzialmente della integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione, approntata e costruita secondo la prescrizione scritta da parte dell'operatore professionale in funzione dell'anatomia/morfologia/deformità dell'utilizzatore attraverso rilievo delle sue misure e prove dirette, è **referibile a quella di un dispositivo fabbricato su misura**.

Fig. 1: Kit pre-assemblato




Fig. 3: Kit pre-assemblato + Kit Imbottitura



## Inserto Nauco

22/24 INSERTI MODULARI MODIFICABILI

Fig. 2: Kit Cunei

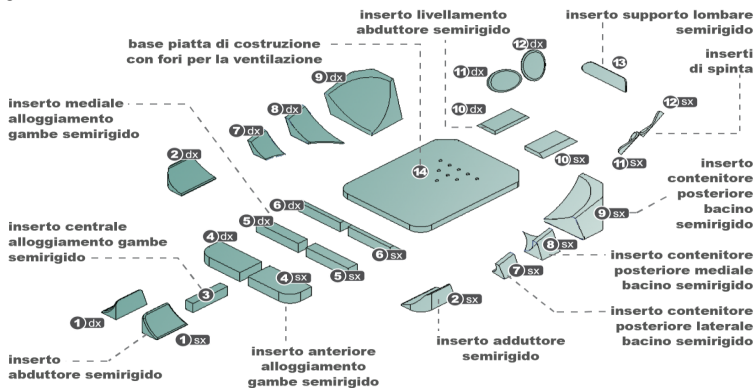

Il kit strutturale dell'Inserto Nauco è composto da una base piatta di costruzione ed una serie di inserti da personalizzare, modellare, modificare secondo necessità (fig. 1 e fig. 2). Ogni elemento del kit strutturale è dotato di nastro aggrappante ad uncini maschio/femmina che consente il saldo collegamento di ogni inserto alla base piatta di costruzione; l'approntamento della forma dell'unità posturale bacino, secondo la prescrizione richiesta e secondo l'anatomia e la morfologia dell'utilizzatore, è realizzata attraverso il rilievo delle sue misure e per mezzo di prove dirette e deve quindi essere attuata come segue, al fine di garantire un'idonea messa in servizio.

### 3. Suggerimenti relativi ad alcune operazioni

#### 3.1 Posizionamento nastro aggrappante

Dovesse rendersi necessario sostituire o integrare il nastro aggrappante ad uncini da uno o più parti del kit strutturale utilizzare quello in dotazione aggiuntiva nell'imballo.

Per fare questo operare come segue: rimuovere la pellicola adesiva e far aderire il nastro alla superficie da adesivizzare. Quindi verificare il posizionamento. Se questo è corretto rimuovere il nastro avendo cura di scaldare per qualche attimo la parte adesiva con un phon industriale ad aria calda (temperatura attorno ai 100°), quindi riposizionare il nastro in maniera definitiva.



Fare attenzione a non deteriorare i materiali durante questa operazione

#### 3.2 Modifiche inserti in dotazione al kit strutturale

Le modifiche di riduzione degli inserti a mezzo asportazione di materiale ove necessarie, saranno attuabili a mezzo cutter. Se si dovesse rendere necessario ricostruire il componente modificato (laddove il materiale asportato lo rendesse possibile) utilizzare un phon industriale ad aria calda (temperatura attorno ai 100°) per scaldare e saldare tra loro le due parti da ricomporre.



Fare attenzione a non deteriorare i materiali durante questa operazione

- 1) Rilevare accuratamente le misure dell'utente e della sua carrozzina/dispositivo di mobilità
- 2) Rimuovere il rivestimento
- 3) Rimuovere l'imbottitura

4) Disporre sulla base piatta (14) gli inserti di alloggiamento gambe (6, 5, 4 e 3) in modo da far coincidere la distanza ischio dx/sx – cavo popliteo dx/sx (-2,5 cm) con la lunghezza della seduta ottenuta dalla combinazione degli stessi sia per il lato dx che per quello sn. La combinazione della distribuzione e della direzionalità degli inserti di alloggiamento gambe può essere differente per il lato dx e per il lato sn.

Si informa che la funzione della base piatta di costruzione (14) è quella di costituire una base di appoggio tra la carrozzina/dispositivo di mobilità, nonché la struttura primaria del kit di costruzione su cui costruire o adattare la seduta posturale utilizzando, rimuovendo o modificando come necessario e come richiesto dalla prescrizione tutti gli altri inserti in dotazione al kit di costruzione.

#### Indicazioni per la lunghezza della seduta

È possibile raggiungere la lunghezza della seduta desiderata operando sia sulla sola base piatta di costruzione (vedesi punto a), che sulla base piatta di costruzione (14) e di conseguenza sull'insieme degli inserti in dotazione al kit strutturale (vedesi punto b), che sul solo insieme di inserti in dotazione al kit strutturale (vedesi punto c).

**a) Base piatta di costruzione:** la base piatta di costruzione (14) ha le sue misure effettive in funzione della misura di unità posturale prescelta e presenta nella zona posteriore dei tagli in diagonale che permettono un minimo di adattamento in profondità. È possibile quindi, una volta adagiata la stessa sul telo della seduta regolare lo scorrimento dei tagli posteriori nello spazio tra i due montanti dello schienale della carrozzina/sistema di mobilità, così da poterne ridurre la sua profondità fino a 3 cm.

Se la misura ottenuta non dovesse bastare, o se si desidera mantenere l'intera lunghezza della base piatta o l'utente presenta una morfologia e misure antropometriche irregolari (es. asimmetria), è possibile ridurre come necessario la misura effettiva della base piatta (14) asportandone la porzione di materiale eccedente, a mezzo cutter, orizzontalmente lungo tutta la parte anteriore o una parte di essa così da renderla asimmetrica.

**b) Base piatta di costruzione e conseguentemente l'insieme di inserti in dotazione:** avendo effettuato come necessario tutte o alcune delle operazioni di cui al precedente punto a) potrà rendersi opportuno effettuare un adeguamento dimensionale della misura della profondità dei singoli inserti in dotazione al kit strutturale asportandone il materiale necessario mediante cutter. Se si rende necessario ridurre la profondità degli inserti contenitori posteriori bacino (9) effettuare la riduzione di una piccola porzione del materiale (max 1 cm), orizzontalmente lungo la superficie posteriore, al fine di evitare di inficiare la curva di avvolgenza del bacino.

Si suggerisce di mantenere la parte di materiale rimosso se non deteriorata dall'asportazione; infatti, in seguito potrebbe rendersi necessario il suo riutilizzo per adeguare il dispositivo alle modificazioni intervenute all'utilizzatore.

In alternativa, può rendersi consono un posizionamento sulla base piatta (14) degli stessi rimuovendo gli inserti in eccedenza o, ancora, potrà rendersi necessario adottare entrambe le azioni precedenti.

Se è necessario aumentare la lunghezza utile della profondità della seduta per una o entrambe le gambe, è possibile posizionare longitudinalmente lungo la base piatta (14) una o entrambe le file di inserti di alloggiamento gambe (4, 5 e 6) lasciando tra loro la distanza necessaria al fine di raggiungere la lunghezza totale desiderata. A tale scopo si potrà ottenere anche una misura fino a 2,5 cm più lunga rispetto alla misura di lunghezza effettiva della base piatta di costruzione. Quanto detto è ottenibile posizionando longitudinalmente su di essa uno o entrambi gli inserti anteriori di alloggiamento gambe (4) con la loro porzione anteriore fuori dalla base piatta per massimo 2,5 cm e la porzione posteriore collegata alla superficie della base piatta a mezzo nastro aggirante ad uncino.

**c) Insieme di inserti in dotazione al kit strutturale:** potrà rendersi opportuno effettuare un adeguamento dimensionale della misura della profondità dei singoli inserti in dotazione al kit strutturale asportandone il materiale necessario mediante cutter. Se si rende necessario ridurre la profondità degli inserti contenitori posteriori bacino (9) effettuare la riduzione di una piccola porzione del materiale (max 1 cm), orizzontalmente lungo la superficie posteriore, al fine di evitare di inficiare la curva di avvolgenza del bacino. Si suggerisce di mantenere la parte di materiale rimosso se non deteriorata dall'asportazione; infatti, in seguito potrebbe rendersi necessario il suo riutilizzo per adeguare il dispositivo alle modificazioni intervenute all'utilizzatore.

In alternativa, può rendersi consono un posizionamento sulla base piatta (14) degli stessi rimuovendo gli inserti in eccedenza o, ancora, potrà rendersi necessario adottare entrambe le azioni precedenti.

Se è necessario aumentare la lunghezza utile della profondità della seduta per una o entrambe le gambe, è possibile posizionare longitudinalmente lungo la base piatta (14) una o entrambe le file di inserti di alloggiamento gambe (4, 5 e 6) lasciando tra loro la distanza necessaria al fine di raggiungere la lunghezza totale desiderata. A tale scopo si potrà ottenere anche una misura fino a 2,5 cm più lunga rispetto alla misura di lunghezza effettiva della base piatta di costruzione. Quanto detto è ottenibile posizionando longitudinalmente su di essa uno o entrambi gli inserti anteriori di alloggiamento gambe (4) con la loro porzione anteriore fuori dalla base piatta per massimo 2,5 cm e la porzione posteriore collegata alla superficie della base piatta a mezzo nastro aggirante ad uncino.

*Si rammenta che ogni personalizzazione di profondità del kit deve essere effettuata considerando l'armonia di appoggio e compatibilità con la carrozzina e/o sistema di mobilità con particolare riferimento tra le variabili all'altezza ed inclinazione delle pedane, profondità del telo di seduta, inclinazione del piano di seduta.*



5) Disporre gli inserti contenitori bacino (8 e 7) in modo da far coincidere la larghezza bacino con la larghezza seduta ottenuta dalla combinazione degli stessi. Si suggerisce di effettuare tale operazione approntando detti inserti (8 e 7) sull'utente seduto sul kit strutturale al fine di orientare come necessario gli inserti stessi. Avere cura durante questa operazione di aumentare di 1,5 cm per lato la distanza tra gli inserti contenitori bacino (8 e 7) rispetto alla larghezza del bacino dell'utilizzatore, al fine di consentire la piena vestibilità quando sarà applicata l'imbottitura.

Si informa che la funzione della base piatta di costruzione (14) è quella di costituire una base di appoggio tra la carrozzina/dispositivo di mobilità, nonché la struttura primaria del kit di costruzione su cui costruire o adattare la seduta posturale utilizzando, rimuovendo o modificando come necessario e come richiesto dalla prescrizione tutti gli altri inserti in dotazione al kit di costruzione.

### Indicazioni per la larghezza della seduta

È possibile raggiungere la larghezza della seduta desiderata operando sia sulla sola base piatta di costruzione (vedesi punto a), che sulla base piatta di costruzione (14) e di conseguenza sull'insieme degli inserti in dotazione al kit strutturale (vedesi punto b), che sul solo insieme di inserti in dotazione al kit strutturale (vedesi punto c).

**a) Base piatta di costruzione:** la base piatta di costruzione (14) è larga 2 cm in meno rispetto alla misura dichiarata del cuscino, per poter sfruttare questa larghezza è necessario non utilizzare l'inserto (3) altrimenti utilizzando tale inserto resta della misura dichiarata. Per consentire l'inserimento della stessa base sul telo della seduta e conseguente compatibilità con la misura della larghezza della carrozzina/base di mobilità, è possibile quindi togliere l'inserto (3).

**b) Base piatta di costruzione e conseguentemente l'insieme di inserti in dotazione:** avendo effettuato l'operazione di cui al precedente punto a) potrà rendersi opportuno effettuare un adeguamento della larghezza dei singoli inserti in dotazione sulla base piatta (14).

Se si rende necessario ridurre la profondità degli inserti contenitori posteriori bacino (9) effettuare la riduzione di una piccola porzione del materiale, orizzontalmente lungo il bordo perimetrale posteriore, al fine di evitare di inficiare la curva concava o convessa.

Se è necessario aumentare la larghezza utile della seduta rispetto alle misure definite per ogni modello, è possibile posizionare ogni inserto in dotazione al kit strutturale utile al contenimento perimetrale dell'utilizzatore sporgente fino ad 1 cm al di fuori della base piatta di costruzione.

**c) Insieme di inserti in dotazione al kit strutturale:** potrà rendersi opportuno effettuare un adeguamento dimensionale della misura della larghezza dei singoli inserti in dotazione al kit strutturale asportandone il materiale necessario mediante cutter. È suggerito rimuovere una piccola porzione di materiale lungo i bordi perimetrali esterni (massimo 1 cm) per evitare di inficiare il design concavo o convesso laddove presente (3, 4, 5 e 6) e lungo i bordi perimetrali interni (9); per gli inserti piatti (3, 4, 5 e 6) praticare questa operazione lungo i bordi longitudinali interni; per gli inserti contenitori posteriori bacino (9) effettuare questa operazione e lungo i bordi longitudinali interni. Se si rende necessario ridurre la profondità degli inserti contenitori posteriori bacino (9) effettuare la riduzione di una piccola porzione del materiale, orizzontalmente lungo il bordo perimetrale posteriore, al fine di evitare di inficiare la curva concava o convessa.

Si suggerisce di mantenere la parte di materiale rimosso se non deteriorata dall'asportazione; infatti, in seguito potrebbe rendersi necessario il suo riutilizzo per adeguare il dispositivo alle modificazioni intervenute all'utilizzatore.

In alternativa, può rendersi consono un posizionamento sulla base piatta (14) degli inserti rimuovendo quelli in eccedenza o, ancora, potrà rendersi necessario adottare entrambe le azioni precedenti.

Se è necessario aumentare la larghezza utile della seduta rispetto alle misure definite per ogni modello, è possibile posizionare ogni inserto in dotazione al kit strutturale utile al contenimento perimetrale dell'utilizzatore sporgente fino ad 1 cm al di fuori della base piatta di costruzione.

### 6) Posizionare ogni altro inserto come necessario



*N.B.: La relazione di spinta, livellamento ed aderenza alla morfologia dell'utente esercitata dall'utilizzo combinato ed armonico di ogni inserto favorisce l'allineamento e compensazione posturale, nonché la distribuzione dei carichi corporei lungo tutta la superficie di seduta. Utilizzare ogni inserto utile tra quelli previsti, al fine di giungere alla compensazione, al sostegno, alla correzione della postura ed alla configurazione di seduta individuale più idonea a ricostruire le forme anatomiche dell'utilizzatore.*

7) Coprire gli inserti con l'imbottitura disponendola come illustrato nella (Fig. 3)

8) Ricoprire il tutto con la fodera di rivestimento. La stessa dotata di bordi elastici presenta nella parte inferiore dei tiranti a molla che sarà opportuno tensionare

9) Una volta configurata l'unità posturale bacino, è opportuno far sedere l'utente per almeno un'ora e valutare se la cute dell'utente presenta rossori; in caso affermativo bisognerà adottare gli interventi più opportuni alla configurazione dell'unità posturale approntata in accordo con le caratteristiche specifiche e progettuali definite dall'utilizzatore professionale sotto la sua responsabilità per lo specifico utente, mentre nell'altro caso si potrà procedere con la consegna definitiva del prodotto

**10)** È opportuno tenere memoria documentale di ogni operazione effettuata, così come è opportuno dare in dotazione all'utente eventuali parti rimosse/asportate utili a possibili interventi/modifiche post consegna.

Prima dell'utilizzo è indispensabile che l'utilizzatore professionale spieghi le procedure per una corretta messa in servizio e per un'ideale manutenzione ordinaria.



*Si consiglia di controllare regolarmente la cute dell'utilizzatore per verificare l'eventuale insorgenza di segni di arrossamento.*

**11)** Quando tutte le operazioni di approntamento del kit alla forma e misure dell'utilizzatore saranno terminate e l'unità posturale sarà pronta per essere consegnata, sarà possibile asportare a mezzo cutter la parte di imbottitura eccedente dai bordi, avendo cura di direzionare il taglio come da design originale.



*In relazione alle operazioni di modifica, lavorazione e/o adattamento effettuate al kit strutturale e imbottitura, la superficie superiore del rivestimento potrebbe risultare maggiorata rispetto alle dimensioni della configurazione di seduta ottenuta. Avere quindi cura di stendere bene detta superficie quando l'utente è seduto, al fine di evitare grinze.*

#### 4. Manutenzione ordinaria e pulizia

Si consiglia di effettuare un'attenta pulizia ed una manutenzione ordinaria con frequenza quindicinale e/o all'occorrenza, controllando tutte le parti del cuscino onde evitare eventuali disagi. Per quanto concerne la pulizia dell'imbottitura, sebbene non ci sia un contatto con la cute, per evitare possibili infezioni si può semplicemente utilizzare un panno umido o una spazzola con setole naturali e acqua tiepida (max 30°) con l'aggiunta di detergente, tamponando con un panno asciutto e successivamente asciugare all'aria aperta, lontano da fonti di calore o luce solare; può essere lavata saltuariamente anche in lavatrice a 30° con detersivo neutro con l'accorgimento di centrifugare a bassa velocità.



*Il tempo dell'asciugatura è abbastanza lungo; si consiglia di dotarsi di un kit imbottitura aggiuntivo.*

Il rivestimento, essendo sfoderabile, può essere lavato come segue:

- a mano e successivamente asciugato all'aria

- in lavatrice (temperatura massima 60°) con l'aggiunta di detergente esclusivamente neutro senza candeggina e successivamente centrifugato ad un basso numero di giri.

Si sconsiglia di utilizzare macchine per l'asciugatura. Il materiale non prevede l'impiego di sostanze disinfettanti.



*Si consiglia di utilizzare un involucro protettivo prima dell'inserimento in lavatrice per evitare eventuali strappi della pellicola prevista nel rivestimento. Si consiglia di dotare di una copertura aggiuntiva.*

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro Servizio Tecnico Commerciale al seguente numero:



**+39 0831 777840**

TABELLA MISURE INSERTO NAUCO	PEDIATRICO				ADULTO
	MODELLO	2225	2530	3034	3638
Larghezza effettiva (cm)	22	25	30	36	40
Larghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	24	27	32	38	42
Larghezza Min ottenibile con asportazione materiale (cm)	20	23	28	34	38
Lunghezza effettiva (cm)	25	30	34	38	42
Lunghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	27,5	32,5	36,5	40,5	44,5
Lunghezza Min ottenibile con asportazione materiale (cm)*	22	27	31	35	39
Range Min e Max altezza anteriore base piatta costruz 14 (cm)	4/5 (altezze riferite ai modelli 2225 e 4042)				
Range Min e Max altezza posteriore base piatta costruz (14) + inserti contenit post (9) (cm)	11,5/18,5 (altezze riferite ai modelli 2225 e 4042)				
Peso unità posturale min/max: 0,4 kg/1,3kg					
Portata massima riferita al modello 4042: 85 kg					

\*possibili ulteriori riduzioni a mezzo asportazione materiale



Qualsiasi operazione di rimozione, preparazione o regolazione per lo specifico utente, sulla base di una prescrizione, deve essere eseguita da un operatore professionale e tali interventi personalizzano il dispositivo. L'utilizzatore professionale ha l'onere e la responsabilità di garantire l'efficacia e le prestazioni del dispositivo.



**PRODOTTO DA:**



**Pro Medicare S.r.l.**

Via Montagna Z.I. - Lotto 41 72023 Mesagne (BR) - ITALY

Tel. +(39) 0831 777840

Email: [sales@promedicare.it](mailto:sales@promedicare.it) - [www.promedicare.eu](http://www.promedicare.eu)