

## INSERTO SEAT PUCCO

La presente scheda tecnica è parte integrante del Manuale di istruzione d'uso della Linea Inserto Seat. Prima dell'utilizzo è indispensabile che l'utilizzatore professionale spieghi le procedure per una corretta messa in servizio e per un'ideale manutenzione ordinaria.

### 1. Messa in servizio

Innovativa unità posturale per il sistema di relazione gambe-bacino-tronco. Completamente modulare ed adattabile, consente innumerevoli utilizzi essendo di semplicissima gestione ed estremamente leggera. È facilmente adattabile alle svariate situazioni terapeutiche e di vita sociale del bambino favorendone la sua integrazione nei diversi contesti come quello familiare e del tempo libero; **Inserto Pucco** rappresenta altresì una intelligente alternativa al tradizionale guscetto.

L'unità posturale bacino **Inserto Pucco** della linea Inserto Seat si presenta come segue:

- 1) Kit strutturale composto da una base piatta di costruzione e da 21 inserti in polietilene a celle chiuse personalizzabili e modificabili, utili a sostenere o correggere nel tempo la postura del bacino e del tronco individualmente; disponibile in due differenti altezze e regolabili nella larghezza e nella profondità, dotato di una cinghia pelvica fissata alla base inferiore della base piatta di costruzione
- 2) Kit di imbottiture composto da 4 pezzi (forme libere) si presenta biaccoppiata (viscoelastica a ritorno lento di memoria a celle aperte e reticolata per la ventilazione) ed una pad protettiva posteriore (viscoelastica a ritorno lento di memoria a celle aperte)
- 3) Fodera di rivestimento areata non contenente lattice (100% poliestere, tessuto ignifugo, anallergico certificato Eeko-Tex standard 100 classe I ed antibatterico Sanitized) o se richiesta per utenti incontinenti, una fodera non traspirante triaccoppiata di nylon/neoprene/lycra, non contenente lattice, a basso rischio di irritazione per la pelle e comunemente utilizzata nei dispositivi medici.



In combinazione con l'unità posturale si possono presentare i seguenti accessori:

- Kit di posizionamento da tavolo
- Kit di due inserti di livellamento del tronco e del capo dotati di cuscinetto imbottito regolabile per l'appoggio della parte posteriore del tronco e di supporto per il capo regolabile imbottito (detti inserti sono altresì utili nell'adattamento dell'unità posturale **Inserto Pucco** ai più comuni passeggini, sedie, seggioloni).

### 2. Utilizzo

L'unità posturale bacino **Inserto Pucco** è consigliata preferibilmente ma non esaustivamente per bambini non deambulanti, in particolare:

- per bambini con insufficiente controllo posturale (ipotonici)
- per bambini che necessitano di controllo del sistema di relazione gambe/bacino/tronco
- per bambini anche piccolissimi che devono essere condotti alla posizione seduta
- per bambini che presentano asimmetrie, colpi di vento, obliquità pelviche, rotazioni pelviche retroversioni ed anteroversioni pelviche o che sono a rischio di lussazioni dell'anca
- per bambini che necessitano di controllo laterale delle gambe per migliorare l'autocontrollo del tronco.

L'unità posturale bacino **Inserto Pucco** può essere combinata, mediante nastro adesivo aggrappante ad uncini, con una qualsiasi base di sostegno e/o carrozzina, purché la struttura che accoglierà l'unità posturale stessa sia sufficientemente solida per reggere in sicurezza l'utente durante l'utilizzo e la stessa abbia una superficie d'appoggio (schienale) su cui adagiarne la parte posteriore.



*Una volta completate le modifiche (eventuali asportazioni/rimozioni di cunei), per l'approntamento e la configurazione della seduta personalizzata ed individuale, come da prescrizione, per la perfetta ricostruzione delle forme anatomiche dell'utente, la stessa persona non potrà essere utilizzata per altri utenti.*

L'unità posturale **Inserto Seat Pucco**, nella sua integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione (Kit strutturale, Kit imbottitura, Rivestimento) può essere semplicemente adattata alle misure/morfologia/deformità dell'utilizzatore. Questo tipo di operazioni rendono la messa in servizio riferibile a quella di un dispositivo di fabbricazione di serie.

In alternativa, la messa in servizio dell'unità posturale **Inserto Seat Pucco**, priva o modificata anche parzialmente della integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione, approntata e costruita secondo la prescrizione scritta da parte dell'operatore professionale in funzione dell'anatomia/morfologia/deformità dell'utilizzatore attraverso rilievo delle sue misure e prove dirette, è riferibile a quella di un dispositivo fabbricato su misura.

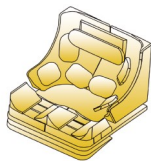



Fig. 1: Kit pre-assemblato

 Fig. 3: Kit pre-assemblato +  
Kit Imbottitura


## Inserto Pucco

21 INSERTI MODULARI MODIFICABILI

Fig. 2: Kit Cunei

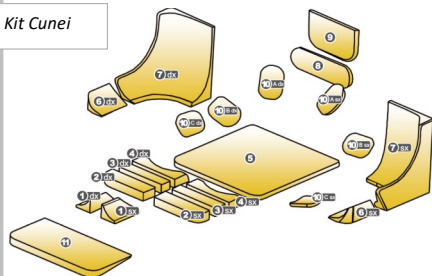

- 1) Inserto abduttore
- 2) Inserto anteriore alloggiamento gambe
- 3) Inserto mediale alloggiamento gambe
- 4) Inserto posteriore trapezoidale alloggiamento gambe
- 5) Base piatta di costruzione
- 6) Inserto adduttore
- 7) Inserto contenitore latero posteriore gambe/bacino/rachide
- 8) Inserto supporto lombare
- 9) Inserto chiusura angolo tronco bacino
- 10) Inserti di spinta
- 11) Inserti di livellamento

Il kit strutturale dell'Inserto Pucco è composto da una base piatta di costruzione ed una serie di inserti da personalizzare, modellare, modificare secondo necessità (fig. 1 e fig. 2). Ogni elemento del kit strutturale è dotato di nastro aggrappante ad uncini maschio/femmina che consente il saldo collegamento di ogni inserto alla base piatta di costruzione; l'approntamento della forma dell'unità posturale bacino, secondo la prescrizione richiesta e secondo l'anatomia e la morfologia dell'utilizzatore, è realizzata attraverso il rilievo delle sue misure e per mezzo di prove dirette e deve quindi essere attuata come segue, al fine di garantire un'ideale messa in servizio.

### 3. Suggerimenti relativi ad alcune operazioni

#### 3.1 Posizionamento nastro aggrappante

Dovesse rendersi necessario sostituire o integrare il nastro aggrappante ad uncini da uno o più parti del kit strutturale utilizzare quello in dotazione aggiuntiva nell'imballo.

Per fare questo operare come segue: rimuovere la pellicola adesiva e far aderire il nastro alla superficie da adesivizzare. Quindi verificare il posizionamento. Se questo è corretto rimuovere il nastro avendo cura di scaldare per qualche attimo la parte adesiva con un phon industriale ad aria calda (temperatura attorno ai 100°), quindi riposizionare il nastro in maniera definitiva.



*Fare attenzione a non deteriorare i materiali durante questa operazione*

#### 3.2 Modifiche inserti in dotazione al kit strutturale

Le modifiche di riduzione degli inserti a mezzo asportazione di materiale ove necessarie, saranno attuabili a mezzo cutter. Se si dovesse rendere necessario ricostruire il componente modificato (laddove il materiale asportato lo rendesse possibile) utilizzare un phon industriale ad aria calda (temperatura attorno ai 100°) per scaldare e saldare tra loro le due parti da ricomporre.



*Fare attenzione a non deteriorare i materiali durante questa operazione*

- 1) Rilevare accuratamente le misure dell'utente e della sua carrozzina/dispositivo di mobilità
- 2) Rimuovere il rivestimento
- 3) Rimuovere l'imbottitura

4) Disporre gli inserti in modo da far coincidere la larghezza bacino con la larghezza seduta ottenuta dalla combinazione degli stessi; a tal fine misurare la larghezza bacino dell'utilizzatore e modificare la posizione degli inserti posteriori (e dei sottocunei) in modo che la distanza tra le loro estremità coincida con tale larghezza. Si suggerisce di effettuare tale operazione approntando detti inserti sull'utente seduto sul kit strutturale, al fine di orientare come necessario gli inserti stessi. Avere cura durante questa operazione di maggiorare di 1 cm per lato la distanza tra gli inserti contenitori laterali rispetto alla larghezza del bacino dell'utilizzatore, al fine di consentire la piena vestibilità quando sarà applicata l'imbottitura.

Si informa che la funzione della base piatta di costruzione (5) è quella di costituire una base di appoggio tra la carrozzina/dispositivo di mobilità, nonché la struttura primaria del kit di costruzione su cui costruire o adattare la seduta posturale utilizzando, rimuovendo o modificando come necessario e come richiesto dalla prescrizione tutti gli altri inserti in dotazione al kit di costruzione.

#### Indicazioni per la larghezza della seduta

È possibile raggiungere la larghezza della seduta desiderata operando sia sulla sola base piatta di costruzione (vedesi punto a), che sulla base piatta di costruzione (5) e di conseguenza sull'insieme degli inserti in dotazione al kit strutturale (vedesi punto b), che sul solo insieme di inserti in dotazione al kit strutturale (vedesi punto c).

a) **Base piatta di costruzione:** la base piatta di costruzione (5) ha le sue misure effettive in funzione della misura di unità posturale prescelta. Per consentire l'inserimento della stessa base sul telo della seduta e conseguente compatibilità con la misura della larghezza della carrozzina/base di mobilità, è possibile quindi asportare una porzione di materiale mediante cutter dai bordi laterali della base piatta fino a massimo 2 cm in totale.

b) **Base piatta di costruzione e conseguentemente l'insieme di inserti in dotazione:** avendo effettuato l'operazione di cui al precedente punto a) potrà rendersi opportuno effettuare un adeguamento dimensionale della misura della larghezza dei singoli inserti in dotazione al kit strutturale asportandone il materiale necessario mediante cutter. È suggerito rimuovere una piccola porzione di materiale lungo i bordi perimetrali esterni (massimo 1 cm) per evitare di inficiare il design, per gli altri inserti praticare questa operazione ove possibile avendo cura di non inficiarne il design. In alternativa, può rendersi consono un posizionamento sulla base piatta (5) degli stessi rimuovendo gli inserti in eccedenza o, ancora, potrà rendersi necessario adottare entrambe le azioni precedenti. Si suggerisce di mantenere la parte di materiale rimosso se non deteriorata dall'asportazione; infatti, in seguito potrebbe rendersi necessario il suo riutilizzo per adeguare il dispositivo alle modificazioni intervenute all'utilizzatore.

Se si rende necessario ridurre la profondità degli inserti contenitori posteriori effettuare la riduzione di una piccola porzione del materiale, orizzontalmente lungo la superficie posteriore, al fine di evitare di inficiare la curva di avvolgenza del bacino.

Se è necessario aumentare la larghezza utile della seduta rispetto alle misure definite per ogni modello, è possibile posizionare ogni inserto in dotazione al kit strutturale utile al contenimento perimetrale dell'utilizzatore sporgente fino ad 1 cm al di fuori della base piatta di costruzione.

c) **Insieme di inserti in dotazione al kit strutturale:** potrà rendersi opportuno effettuare un adeguamento dimensionale della misura della larghezza dei singoli inserti in dotazione al kit strutturale asportandone il materiale necessario mediante cutter. È suggerito rimuovere una piccola porzione di materiale lungo i bordi perimetrali esterni (massimo 1 cm) per evitare di inficiare il design, per gli altri inserti praticare questa operazione ove possibile avendo cura di non inficiarne il design. In alternativa, può rendersi consono, se si rende necessario ridurre la profondità degli inserti contenitori posteriori, effettuare la riduzione di una piccola porzione del materiale, orizzontalmente lungo la superficie posteriore, al fine di evitare di inficiare la curva di avvolgenza del bacino (asportare max 1 cm).

Si suggerisce di mantenere la parte di materiale rimosso se non deteriorata dall'asportazione; infatti, in seguito potrebbe rendersi necessario il suo riutilizzo per adeguare il dispositivo alle modificazioni intervenute all'utilizzatore.

In alternativa, può rendersi consono un posizionamento sulla base piatta (5) degli inserti rimuovendo quelli in eccedenza o, ancora potrà rendersi necessario adottare entrambe le azioni precedenti.

Se è necessario aumentare la larghezza utile della seduta rispetto alle misure definite per ogni modello, è possibile posizionare ogni inserto in dotazione al kit strutturale utile al contenimento perimetrale dell'utilizzatore sporgente fino ad 1 cm al di fuori della base piatta di costruzione.

5) Disporre gli inserti in modo da far coincidere la lunghezza del femore con la lunghezza della seduta ottenuta dalla combinazione degli stessi.

#### Indicazioni per la lunghezza della seduta

È possibile raggiungere la lunghezza della seduta desiderata operando sia sulla sola base piatta di costruzione (vedesi punto a), che sulla base piatta di costruzione (5) e di conseguenza sull'insieme degli inserti in dotazione al kit strutturale (vedesi punto b), che sul solo insieme di inserti in dotazione al kit strutturale (vedesi punto c).

a) **Base piatta di costruzione:** la base piatta di costruzione (5) ha le sue misure effettive in funzione della misura di unità posturale prescelta e presenta dei tagli posteriori. È possibile quindi, una volta adagiata la stessa sul telo della seduta regolarne lo scorrimento nello spazio tra i due montanti dello schienale della carrozzina/sistema di mobilità, così da poterne ridurre la sua profondità fino a 1 cm.

Se la misura ottenuta non dovesse bastare, o se si desidera mantenere l'intera lunghezza della base piatta o l'utente presenta una

morfologia e misure antropometriche irregolari (es. asimmetria), è possibile ridurre come necessario la misura effettiva della base piatta (5) asportandone la porzione di materiale eccedente a mezzo cutter orizzontalmente lungo tutta la parte anteriore o una parte di essa così da renderla asimmetrica.


**b) Base piatta di costruzione e conseguentemente l'insieme di inserti in dotazione:** avendo effettuato come necessario tutte o alcune delle operazioni di cui al precedente punto a) potrà rendersi opportuno effettuare un adeguamento dimensionale della misura della profondità dei singoli inserti in dotazione al kit strutturale asportandone il materiale necessario mediante cutter. Se si rende necessario ridurre la profondità degli inserti, effettuare l'operazione avendo cura di farla lungo i bordi ove ciò è possibile senza intaccarne il design, per gli inserti contenitori posteriori (7) effettuare la riduzione di una piccola porzione del materiale (max 1 cm), orizzontalmente lungo la superficie posteriore, al fine di evitare di inficiare la curva di avvolgenza del bacino.

Si suggerisce di mantenere la parte di materiale rimosso se non deteriorata dall'asportazione; infatti, in seguito potrebbe rendersi necessario il suo riutilizzo per adeguare il dispositivo alle modificazioni intervenute all'utilizzatore.

In alternativa, può rendersi consono un posizionamento sulla base piatta (5) degli stessi rimuovendo gli inserti in eccedenza o, ancora, potrà rendersi necessario adottare entrambe le azioni precedenti.


**c) Insieme di inserti in dotazione al kit strutturale:** potrà rendersi opportuno effettuare un adeguamento dimensionale della misura della profondità dei singoli inserti in dotazione al kit strutturale asportandone il materiale necessario mediante cutter. Se si rende necessario ridurre la profondità degli inserti, effettuare l'operazione avendo cura di farla lungo i bordi ove ciò è possibile senza intaccarne il design, per gli inserti contenitori posteriori (7) effettuare la riduzione di una piccola porzione del materiale (max 1 cm), orizzontalmente lungo la superficie posteriore, al fine di evitare di inficiare la curva di avvolgenza del bacino. Si suggerisce di mantenere la parte di materiale rimosso se non deteriorata dall'asportazione; infatti, in seguito potrebbe rendersi necessario il suo riutilizzo per adeguare il dispositivo alle modificazioni intervenute all'utilizzatore.

In alternativa, può rendersi consono un posizionamento sulla base piatta (5) degli stessi rimuovendo gli inserti in eccedenza o, ancora, potrà rendersi necessario adottare entrambe le azioni precedenti.



*Si rammenta che ogni personalizzazione di profondità del kit deve essere effettuata considerando l'armonia di appoggio e compatibilità con la carrozzina e/o sistema di mobilità con particolare riferimento tra le variabili all'altezza ed inclinazione delle pedane, profondità del telo di seduta, inclinazione del piano di seduta.*

#### 6) Posizionare ogni altro inserto come necessario



*N.B.: La relazione di spinta, livellamento ed aderenza alla morfologia dell'utente esercitata dall'utilizzo combinato ed armonico di ogni inserto favorisce l'allineamento e compensazione posturale, nonché la distribuzione dei carichi corporei lungo tutta la superficie di seduta. Utilizzare ogni inserto utile tra quelli previsti, al fine di giungere alla compensazione, al sostegno, alla correzione della postura ed alla configurazione di seduta individuale più idonea a ricostruire le forme anatomiche dell'utilizzatore.*

7) Coprire gli inserti con l'imbottitura disponendola nello stesso modo come illustrato nella (Fig. 3)

8) Ricoprire il tutto con la fodera di rivestimento. La stessa dotata di bordi elastici presenta nella parte inferiore dei tiranti a molla che sarà opportuno tensionare

9) Una volta configurata l'unità posturale bacino, è opportuno far sedere l'utente per almeno un'ora e valutare se la cute dell'utente presenta rossori; in caso affermativo bisognerà adottare gli interventi più opportuni alla configurazione dell'unità posturale approntata in accordo con le caratteristiche specifiche e progettuali definite dall'utilizzatore professionale sotto la sua responsabilità per lo specifico utente, mentre nell'altro caso si potrà procedere con la consegna definitiva del prodotto


10) È opportuno tenere memoria documentale di ogni operazione effettuata, così come è opportuno dare in dotazione all'utente eventuali parti rimosse/asportate utili a possibili interventi/modifiche post consegna.

Prima dell'utilizzo è indispensabile che l'utilizzatore professionale spieghi le procedure per una corretta messa in servizio e per un'ideale manutenzione ordinaria.



*Si consiglia di controllare regolarmente la cute dell'utilizzatore per verificare l'eventuale insorgenza di segni di arrossamento.*

11) Quando tutte le operazioni di approntamento del kit alla forma e misure dell'utilizzatore saranno terminate e l'unità posturale sarà pronta per essere consegnata, sarà possibile asportare a mezzo cutter la parte di imbottitura eccedente dai bordi, avendo cura di direzionare il taglio come da design originale.



*In relazione alle operazioni di modifica, lavorazione e/o adattamento effettuate al kit strutturale e imbottitura, la superficie superiore del rivestimento potrebbe risultare maggiorata rispetto alle dimensioni della configurazione di seduta ottenuta. Avere quindi cura di stendere bene detta superficie quando l'utente è seduto, al fine di evitare grinze.*

#### 4. Manutenzione ordinaria e pulizia

Si consiglia di effettuare un'attenta pulizia ed una manutenzione ordinaria con frequenza quindicinale e/o all'occorrenza, controllando tutte le parti del cuscino onde evitare eventuali disagi. Per quanto concerne la pulizia dell'imbottitura, sebbene non ci sia un contatto con la cute, per evitare possibili infezioni si può semplicemente utilizzare un panno umido o una spazzola con setole naturali e acqua tiepida (max 30°) con l'aggiunta di detergente, tamponando con un panno asciutto e successivamente asciugare all'aria aperta, lontano da fonti di calore o luce solare; può essere lavata saltuariamente anche in lavatrice a 30° con detersivo neutro con l'accorgimento di centrifugare a bassa velocità.



*Il tempo dell'asciugatura è abbastanza lungo; si consiglia di dotarsi di un kit imbottitura aggiuntivo.*

Il rivestimento, essendo sfoderabile, può essere lavato come segue:

- se trattasi di **rivestimento areato**: lavare in lavatrice ad una temperatura max di 40°, con l'aggiunta di detergente esclusivamente neutro senza candeggina; successivamente asciugare all'aria e nel caso stirare a bassa temperatura (è consentito il lavaggio a secco)
- se trattasi di **rivestimento incontinente**: lavare a mano con acqua tiepida (max 30°) con l'aggiunta di detergente esclusivamente neutro senza candeggina e successivamente asciugare all'aria.

Si sconsiglia di utilizzare macchine per l'asciugatura. Il materiale non prevede l'impiego di sostanze disinfettanti.


Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro Servizio Tecnico Commerciale al seguente numero:



**+39 0831 777840**

TABELLA MISURE INSERTO PUCCO		
MODELLO	UUS	US
Larghezza (cm)	25	30
Lunghezza (cm)	30	38

TABELLA MISURE INSERTO PUCCO						
MODELLO	Altezza effettiva schienale		Profondità effettiva seduta		Larghezza effettiva seduta	
	UUS	US	UUS	US	UUS	US
<b>Pucco Alto</b>	20	28	Min. 15 Max. 25	Min. 21 Max. 32	Min. 13 Max. 23	Min. 20 Max. 32
<b>Pucco Basso</b>	15	20	Min. 15 Max. 25	Min. 21 Max. 32	Min. 13 Max. 23	Min. 20 Max. 32

 *Qualsiasi operazione di rimozione, preparazione o regolazione per lo specifico utente, sulla base di una prescrizione, deve essere eseguita da un operatore professionale e tali interventi personalizzano il dispositivo. L'utilizzatore professionale ha l'onere e la responsabilità di garantire l'efficacia e le prestazioni del dispositivo.*



**PRODOTTO DA:**



**Pro Medicare S.r.l.**

Via Montagna Z.I. - Lotto 41 72023 Mesagne (BR) - ITALY

Tel. +(39) 0831 777840

Email: [sales@promedicare.it](mailto:sales@promedicare.it) - [www.promedicare.eu](http://www.promedicare.eu)