

- Scheda Tecnica Dispositivo Posturale WHIPPY -

<u>Identificazione Fabbricante</u>	<p>Pro Medicare s.r.l. Via Montagna Z.I. Lotto 41 72023 Mesagne (Br) P IVA 01803920741 Tel. 0039 0831 777840 Fax 0039 0831 730739 sito web: www.promedicare.eu email: info@promedicare.it</p>
<u>Denominazione commerciale</u>	WHIPPY
<u>Identificativo UDI-DI BASIC</u>	805571347STARTISZH
<u>Codice dispositivo</u>	D03-201-1 colore verde pastello D03-501-1 colore verde salvia
<u>Numero di registrazione ministero/Repertorio</u>	2245140
<u>Codice di classificazione (CND)</u>	Y180939
<u>Classe dispositivo medico</u>	<i>Il sistema di postura modulare toto corpo WHIPPY è marcato CE secondo il Regolamento UE 2017/745 ed è un dispositivo medico di classe I non sterile.</i>
<u>Destinazione d'uso</u>	<p><i>WHIPPY è un sistema di postura modulare toto corpo per uso pediatrico destinato ad utenti che hanno o potrebbero sviluppare bisogni posturali complessi, tali da non consentire una postura autonoma, allineata e stabile sia nella posizione seduta che in quella distesa.</i></p> <p><i>Sono previste differenti modalità d'uso, passando da una configurazione di utilizzo ripiegata ad una configurazione di non utilizzo estesa e, viceversa, da una configurazione di utilizzo estesa ad una configurazione di non utilizzo ripiegata.</i></p> <p><i>L'utilizzo e l'adattamento del dispositivo è consentito come da prescrizione scritta e la prima messa in servizio deve essere eseguita necessariamente dall'utilizzatore professionale.</i></p> <p><i>Gli utilizzi successivi alla prima messa in servizio possono essere eseguiti dal genitore come da prescrizione.</i></p> <p><i>Il suo utilizzo è consentito in combinazione con una base di mobilità/di supporto sia per interni che esterni, sia esso dispositivo medico che non (es. navicella, passeggino, seggiolone) dotata di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - inclinazione schienale >90° e/o basculamento antero posteriore passivo attivato; - cinghia di sicurezza per il tronco-bacino dell'utente. <p><i>Inoltre il suo utilizzo è atto a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - trattare i disturbi posturali consentendo un posizionamento personalizzato e confortevole dell'utente; - consentire il sostegno posturale, posizionamento, mobilizzazione e riposizionamento dell'utente, con particolare riferimento alla posizione seduta e/o distesa; - permettere la distribuzione omogenea delle pressioni e il conseguente scarico dei punti critici attraverso il contenimento e l'allineamento posturale. <p><i>Non è previsto un utilizzo esteso del dispositivo su utenti per i quali sia controindicata la posizione estesa o un utilizzo ripiegato del dispositivo su utenti per i quali sia controindicata la posizione seduta; non è un materasso per dormire.</i></p>

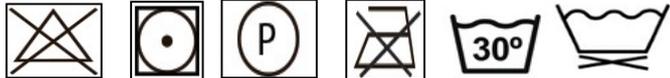
<p style="text-align: center;"><u>Caratteristiche tecniche</u></p>	<p>DIMENSIONI: Lunghezza x Larghezza: 66x28,5 [cm]/25.9x11.2 [in] PESO: inferiore a 1kg/2.2 [lb] PORTATA MAX: 12 kg/26.4 [lb] Whippy è costituito da: - una base flessibile dotata di cinghie di fissaggio ed elemento di irrigidimento posto al suo interno; - una serie di elementi di contenimento posturali. Per il dettaglio della configurazione standard e dei relativi accessori/ricambi fare riferimento al relativo modulo d'ordine.</p> <p>PRESTAZIONI E DURATA: La durata del mantenimento delle prestazioni, in condizioni di sicurezza, dei dispositivi in oggetto è definito pari a 2 anni (imbottiture) validi alle normali condizioni d'uso e alla corretta manutenzione secondo quanto previsto dal manuale.</p> <p>MATERIALI: L'intero sistema è realizzato in materiale polimerico e combina differenti caratteristiche di densità, elasticità, portanza e memoria di forma; il tutto è rivestito con un tessuto polimerico a composizione combinata PU/PES con le seguenti caratteristiche: - antibatterico - non citotossico - non irritante - resistente alla penetrazione di virus - antifungo - ignifugo - biocompatibile - certificato OEKO-TEX® - privo di lattice - traspirante - impermeabile - lavabile - igienizzabile.</p> <p>PULIZIA E MANUTENZIONE: Il rivestimento, che è sfoderabile, può essere lavato a 30° con detergente neutro ed igienizzato superficialmente con i seguenti detergenti/disinfettanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERSIL EXPERT coldzyme/HENKEL - 70% etanol - PERFORM/Schuelke - TPH PROTECT/Schuelke - MIKROZID AF liquid/Oktalpharma - INCIDIN PLUS/Ecolab - DESCOGEN liquid/Antiseptica - MANORAPID/Antiseptica - PLIVASEPT/Pliva <p>NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI PRODOTTI A BASE DI IPOCLORITO DI SODIO. NON CENTRIFUGARE NÉ STERILIZZARE IN AUTOCLAVE.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>CONFEZIONAMENTO: Viene fornito all'interno della sua sacca portatile e confezionato singolarmente in cartone.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Accessori</u></p>	<p>Whippy prevede i seguenti accessori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuneo posizionatore - Kit elemento di posizionamento aggiuntivo - Kit estensore flessibile per gambe con kit posizionatore - Cinghia pelvica - Livellamento 15° e 30° - Foderina kit capo - Borsa organizer per elementi

Immagine prodotto:
le immagini sono puramente illustrative



Configurazione ripiegata



Configurazione distesa

Di seguito sono mostrati alcuni accessori in combinazione col dispositivo



Foderina kit capo



*Kit estensore flessibile
per gambe con kit posizionale
dimensioni Lunghezza x Larghezza:
76x28,5[cm]/29.9x11.2[in]*